



Taster „Set“:

1. Für die Linienüberwachung der am Zimmerbus angeschlossenen Taster und Module muß die Zimmerelektronik die Teilnehmer erst „lernen“.

Set-Taste etwa 10 Sek. Drücken. Die grüne Lampe beginnt zu blinken. Die Zimmerelektronik tastet den Zimmerbus nach allen im System möglichen Komponenten ab. Die gefundenen werden dauerhaft gemerkt. Dieser Vorgang kann bis zu 30 Sek. dauern.

Fällt während des laufenden Betriebs eine Komponente aus, so wird eine Linienstörung gemeldet.

Achtung:

Für bestimmte Komponenten ist dieses „lernen“ zwingend erforderlich, da sie sonst nicht ordnungsgemäß bedient werden. Dazu gehört der Ruf-Anwesenheitstaster mit Summer oder auch die separate 2-Draht Zimmersignalleuchte.

Deshalb nach Austausch von Komponenten oder vor der Prüfung der Zimmerinstallation erst „lernen“ lassen !

Drehschalter S1

Funktion	Pos.
Keine Funktion	0
ASK-Busadresse	1-8
Keine Funktion	9
WC-Rufabstellung über Anwesenheits-Taster ändern	A
Drehschalter auf Pos.A stellen und Zimmerelektronik für ca. 2sec. mit ASK-Bus Anschluss verbinden. Zimmerelektronik vom Bus entfernen, Drehschalter auf vorherige Adresse einstellendanach Zimmerelektronik wieder mit ASK-Bus verbinden.	
Keine Funktion	B-F