


+24VDC	Versorgung 18-27VDC
0V	0V
Rufleitung	Rufleitung 0,7-2V = Ruhelage 4,7V Impuls = Steckerruf 10 V Impuls = Bett-1 Ruf 15 V = Bett-2 Ruf größer 18V = Zimmerruf
BL-Anzeige	LED Anzeige am Taster und am Handgerät 0V LED an, wenn Taste gedrückt wurde

Steckbrücken (Jumper)

	Gesteckt	Nicht gesteckt
Findelicht	Findelicht an	Findelicht aus
Ltg.-Wdst	Leitungswiderstand muß im letzten Taster der Linie gesteckt sein.	

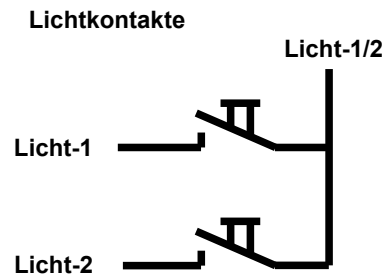

! Nicht für 230V zulässig !