

Sicherheitshinweise:

Bevor Sie die Zimmerelektronik in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch!

Beachten Sie bei der Montage und Installation die einsatzspezifischen Sicherheitsvorschriften, Normen und Richtlinien!

Lassen Sie nicht funktionierende Geräte vom Hersteller überprüfen!

Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen vor!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Verwenden Sie die iNet Zimmerelektronik mit ausschließlich in Verbindung mit passenden Komponenten der Ilper Elektronik GmbH & Co. KG.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen.

Entsorgungshinweise:

Altgeräte oder Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!
Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle oder über Ihren Fachhändler.



Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe.

**Gewährleistung:**

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen.


Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

**Technische Daten:**



Versorgung:	24VDC über 2-Draht ASK oder 4-Draht ASK
Datenverbindung:	ASK-Bus Einzel, 4-er, 8er-Bus
Strombedarf:	15 mA im Leerlauf
Anschlüsse:	Bettenlinie 4-Draht WC-Linie 4-Draht Zimmersignalleuchte 4-Draht
Farbe:	weiß RAL 9016
Abmessungen:	(BxH) 80 x 160 mm

Anschlüsse:


Adressschalter	Einstellung der Geräteadresse
Nur Werte von 1-8 sind zulässig! Bei Einzelverbindung zum Schnittstellenverteiler (kein Bus) kann jede beliebige Adresse von 1-8 eingestellt werden.	

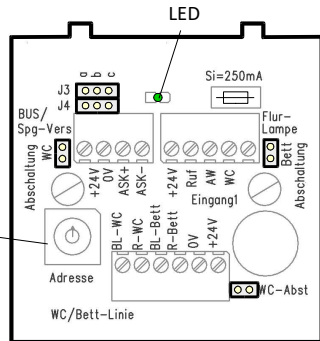


Anschluss an Schnittstellenverteiler

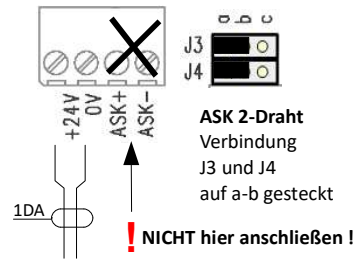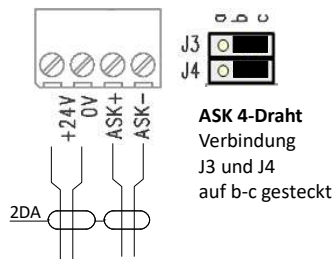

Anschluss Zimmersignalleuchte

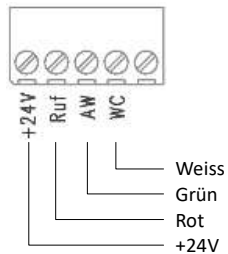


Anschluss Ruflinien

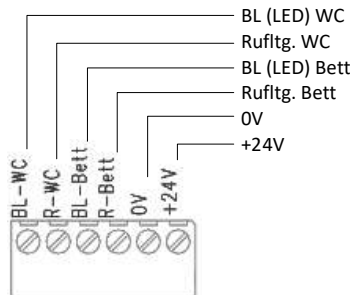


LED

An	Zeigt Ruf
Blinkt kurz	Zeigt Kommunikation mit Schnittstellenverteiler

Steckbrücken

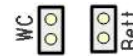

Nicht gesteckt: Die Linie ist eingeschaltet!
Eine Rufkomponente ist an dieser Linie angeschlossen.

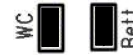

Gesteckt: Die Linie ist abgeschaltet!
Stecken Sie die Steckbrücke, wenn keine Komponente an dieser Linie angeschlossen ist!
Bleibt die Linie offen, würde sonst eine Linienstörung (St.-L) generiert.



Nicht gesteckt: WC-Abstellung mit WC-Zugschalter (3 Sek.) bei gesetzter Anwesenheit.



Gesteckt: WC Abstellung über Anwesenheit.

! Achtung ! Gem. VDE 0834 ist diese Option nur zulässig, wenn die auslösenden Geräte im WC-Bereich, wie Zugtaster, vom Standort der Zimmerelektronik **ohne** Einschränkungen einsehbar sind!

Findelicht Ein / Aus

Drücken Sie die rote und grüne Taste gleichzeitig für 10 Sekunden, bis die grüne Taste zu blinken beginnt.

Nun können Sie mit der roten Taste das Findelicht Ein- und Aus schalten.

Zum Speichern drücken Sie nochmals die grüne Taste.

Ab Werk ist das Findelicht AN.

Umschaltung der Betriebsart und der Option BL an der Zimmerelektronik

Während des Betriebs den Drehschalter für die Geräteadresse auf „0“ stellen. Drücken Sie anschließend die rote und grüne Taste gleichzeitig für 10 Sekunden, bis die grüne Taste zu blinken beginnt.

Durch Antippen der grünen Taste können Sie zwischen den Einstellungen wechseln. Mit der roten Taste aktivieren/deaktivieren Sie die jeweilige Option:

Grüne LED blinkt einzeln: Auswahl des Betriebsmodus Standard/Light
Rote LED aus: Betriebsmodus Standard *)
Rote LED an: Betriebsmodus Light

Grüne LED blinkt doppelt: Aktivierung der Option BL an der Zimmerelektronik
Rote LED aus: Nur Zimmerruf wird an der Zimmerelektronik angezeigt *)
Rote LED an: Alle Rufe werden an der Zimmerelektronik angezeigt

Zum Speichern halten Sie die grüne Taste für drei Sekunden gedrückt.

Anschließend muss der Drehschalter auf die ursprüngliche Position zurückgestellt werden. Durch einen Piepston signalisiert die Zimmerelektronik, dass die ursprüngliche Position noch nicht wieder erreicht wurde.

*) Werkseinstellung