



Anschaltung Störmeldekontakt der USV 900092 / 093 - an Zimmerelektronik KlickLine 910251

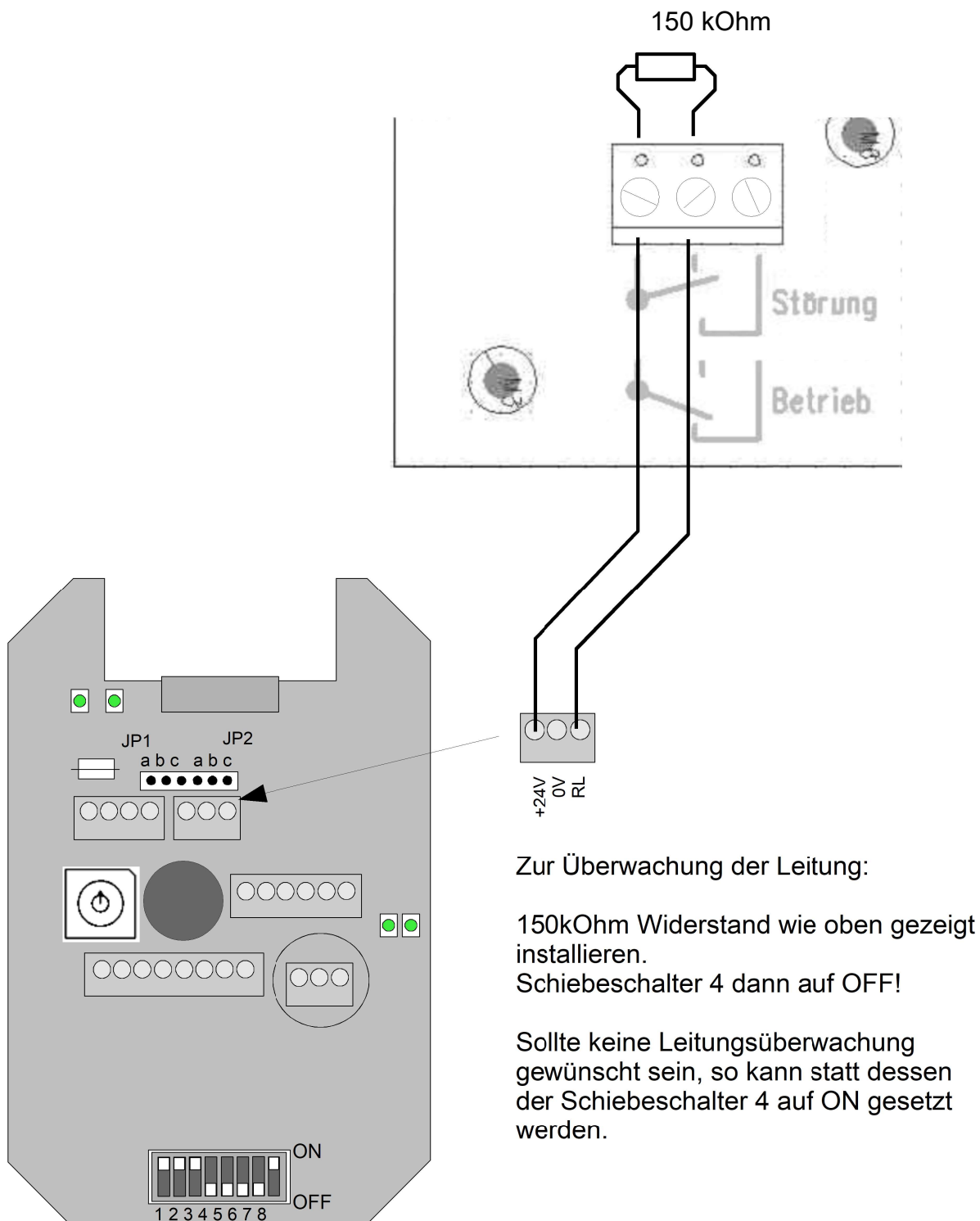

- an Zimmerelektronik CallLine2 910262

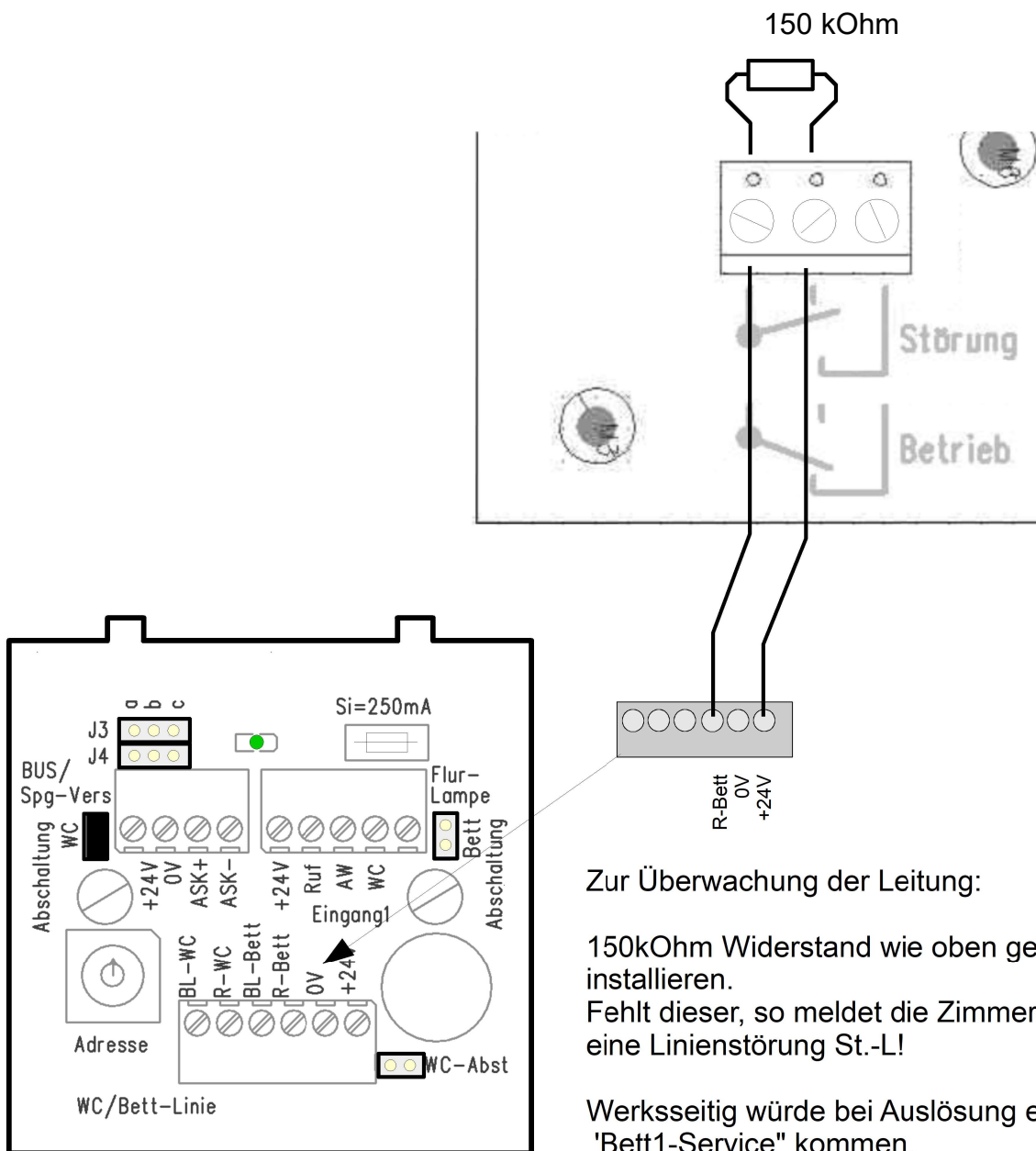

Zur Überwachung der Leitung:

150kOhm Widerstand wie oben gezeigt installieren.

Fehlt dieser, so meldet die Zimmerelektronik eine Linienstörung St.-L!

Werksseitig würde bei Auslösung eine Meldung: 'Bett1-Service' kommen.

Ist dieses nicht erwünscht, so kann die Zimmerelektronik auf Funktion Zimmerelektronik-Light umgeschaltet werden. Dann meldet sie: "Zimmer Ruf".

Für Details beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung der Zimmerelektronik!